

アルコール検知器 ソシアック・アルファー SC-402 の使い方

- 1 センサーカバーを上げてください。




- 2 本体横のON/OFFスイッチを押し、電源を入れてください。
作動表示のStandby(スタンバイ)が点滅すると同時にデジタル表示部の
カウントダウンが始まります。(14・13・12...1、または6・5・4...1)



- 3 GO!(ゴー)のランプが点滅し、「ピッ」という電子音と同時に吹き込み口に
「約4秒間」息を「はぁー」と吹きかけてください。
再び「ピッ」という電子音がなりますので、それまで吹き続けてください。

◎口元から約1cmの間隔(ソシアックを持った手の親指が唇に触れる程度)をあ
け、センサー上部を息が 吹きぬけるように、お腹のそこから息を吐きガラス
を曇らせるイメージで「はぁー」と吹いてください。

◎約4秒間吹き続けてください。一気に吹くと息が4秒間続きません。4秒間息
が続くような強さ(呼気量)で吹いてください。

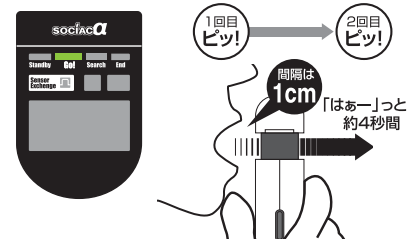

エラーの場合/正確な測定ができなかった場合は、「ピーツ、ピーツ、ピーツ」
という電子音が鳴り、赤色LEDが点灯。数値表示が「—」となります。
ON/OFFスイッチを押し、一旦電源を切った後、上記の点に注意して
「2」からやり直してください。

ピーツ
ピーツ!
ピーツ!



- センサーカバーを上げているか。
 - 約4秒間息を吹き続けているか。
 - 吹き込み口に正確に息を通しているか。
 - ガラスを曇らせるイメージで「はぁー」と吹いているか。
- などを確認してください。

- 4 4秒間の中でセンサーが感知するとSearch!(サーチ)が点滅し測定を行います。



- 5 End(エンド)が点滅し、測定値を表示します。
測定値が0.00mg/ℓで緑色のLEDが点灯、0.01mg/ℓ以上で赤色LEDが点灯します。

- 測定値が0.00mg/ℓの場合→緑色のLEDが点灯し「ピピッ」と電子音がなります。
- 測定値が0.01mg/ℓ以上の場合→赤色LEDが点灯し「ピーーピーーピーー」と電子音がなります。

※測定後はON/OFFスイッチを押し電源を切りカバーを元通り戻してください。
ONのまま放置された場合でも、1分後自動的に電源はOFFになります。




※表示された数値は、あくまで目安です。使用状況に拘わらず、若干の誤差が生じる場合があります。自動車運転や機械操作等の可否を判断するものではありません。

マウスピースアタッチメント(付属)の使用方法

ソシアック・アルファーは、付属のマウスピースアタッチメントを装着し、吹き込む事も可能です。また複数人で使用
の場合、市販のストロー(4mmか6mm)を利用した測定も可能です。※ストローは付属していません。


- 市販のストローを使用する場合10cm程度にカットしてご使用ください。
- ストローを止まる位置まで差し込んでセットしてください。
- マウスピースアタッチメントは、定期的に水洗いしてよく乾燥させて使用してください。
- マウスピースアタッチメントが汚れてきたり、強いにおいがしてきた場合は、新品(別売)に交換してください。

※本器は直接吹き込む方法で感度を設定しており、表示された数値はあくまで目安です。
※複数人でひとつのマウスピースアタッチメント(同じストロー)を使用しないでください。
※付属のマウスピースアタッチメントや市販のストローを使用しても状況にかかわらず数値の誤差は生じます。
※付属のマウスピースアタッチメントやカットしたストローは絶対にお子様の手の届かない場所で使用および保管してください。

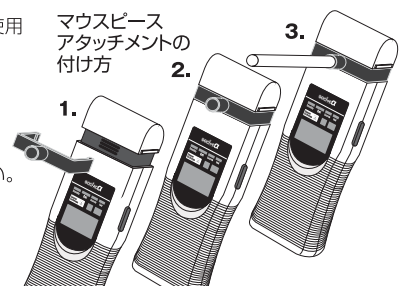

アルコール検知器 ソシアック・アルファネクスト SC-403 の使い方

- 1** ※ご使用前に、時計を設定してください。
センサーカバーを上げてください。

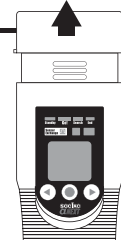


- 2** 本体中央の●ボタンのON/OFFスイッチを押し、電源を入れてください。
作動表示のStandby(スタンバイ)が点滅すると同時にデジタル表示部の
カウントダウンが始まります。(14・13・12...1、または6・5・4...1)



- 3** GO!(ゴー)のランプが点滅し、「ビッ」という電子音と同時に吹き込み口に
「約4秒間」息を「はぁー」と吹きかけてください。
再び「ビッ」という電子音がなりますので、それまで吹き続けてください。

◎口元から約1cmの間隔(ソシアックを持った手の親指が唇に触れる程度)をあ
け、センサー上部を息が 吹きぬけるように、お腹のそこから息を吐きガラス
を曇らせるイメージで「はぁー」と吹いてください。

◎約4秒間吹き続けてください。一気に吹くと息が4秒間続きません。4秒間息
が続くような強さ(呼気量)で吹いてください。

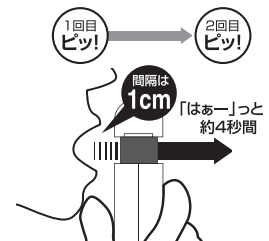

エラーの場合/正確な測定ができなかった場合は、「ピーッ、ピーッ、ピーッ」
という電子音が鳴り、赤色LEDが点灯。数値表示が「—」となります。
◎スイッチを押し、一旦電源を切った後、上記の点に注意して
「2」からやり直してください。

ピーッ!
ピーッ!
ピーッ!



- センサーカバーを上げているか。
 - 約4秒間息を吹き続けているか。
 - 吹き込み口に正確に息を通しているか。
 - ガラスを曇らせるイメージで「はぁー」と吹いているか。
- などを確認してください。

- 4** 4秒間の中でセンサーが感知するとSearch!(サーチ)が点滅し測定を行います。



- 5** End(エンド)が点滅し、測定値を表示します。
測定値が0.00mg/ℓで緑色のLEDが点灯、0.01mg/ℓ以上で赤色LEDが点灯します。

- 測定値が0.00mg/ℓの場合→緑色のLEDが点灯し「ピッ」と電子音がなります。
- 測定値が0.01mg/ℓ以上の場合→赤色LEDが点灯し「ピーーピーーピーー」と電子音がなります。

※測定後はON/OFFスイッチを押し電源を切りカバーを元通り戻してください。
ONのまま放置された場合でも、1分後自動的に電源はOFFになります。



※表示された数値は、あくまで目安です。使用状況に拘わらず、若干の誤差が生じる場合があります。自動車運転や機械操作等の可否を判断するものではありません。

マウスピースアタッチメント(付属)の使用方法

ソシアック・アルファは、付属のマウスピースアタッチメントを装着し、吹き込む事も可能です。また複数人で使用
の場合、市販のストロー(4mmか6mm)を利用した測定も可能です。※ストローは付属していません。

- 市販のストローを使用する場合10cm程度にカットしてご使用ください。
- ストローを止まる位置まで差し込んでセットしてください。
- マウスピースアタッチメントは、定期的に水洗いしてよく乾燥させて使用してください。
- マウスピースアタッチメントが汚れてきたり、強いにおいがしてきた場合は、新品(別売)に交換してください。

※本器は直接吹き込む方法で感度を設定しており、表示された数値はあくまで目安です。
※複数人でひとつのマウスピースアタッチメント(同じストロー)を使用しないでください。
※付属のマウスピースアタッチメントや市販のストローを使用しても状況にかかわらず数値の誤差は生じます。
※付属のマウスピースアタッチメントやカットしたストローは絶対にお子様の手の届かない場所で使用および保管してください。

マウスピース
アタッチメントの
付け方

