

ドライバーの手動インストール手順ver1.01





「ソシアック・ネオ専用管理ソフト パソコン操作取扱説明書」のP9にあるドライバーのインストールについては本手順書に沿ってインストールしてください。


① 下記URLよりドライバーの公式インストールページへ移動します。



※Google等の検索エンジンにて「CH341SER」と検索し、インストールページへ移動します。




http://www.wch-ic.com/downloads/CH341SER_EXE.html

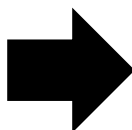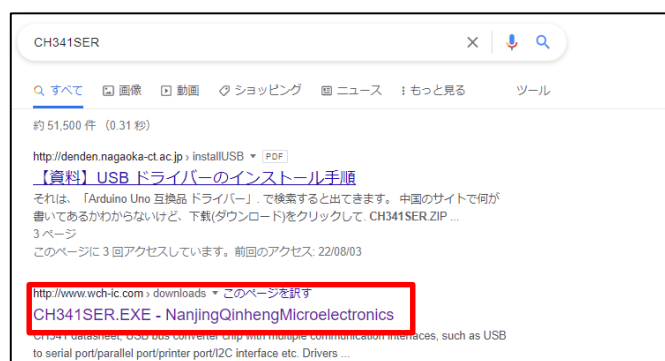

② 「CH341SER.EXE」の商品ページよりダウンロードをクリックするとPCにダウンロードされます。

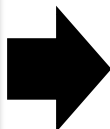


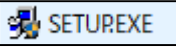
③  をクリックすると、自動的にインストール画面が開くので  をクリックします。右の画像が表示されれば正常にインストール完了です。

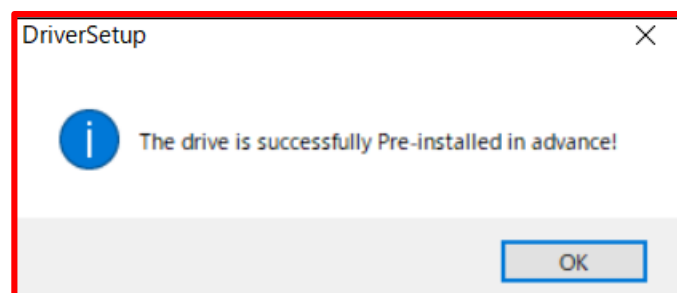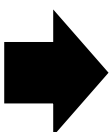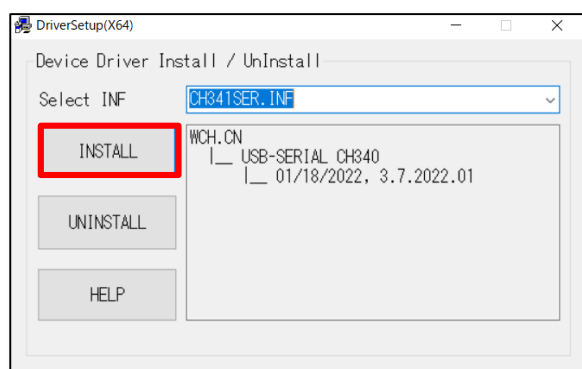




※使用するPCや環境により表示が異なります。

ドライバーの手動インストール手順ver1.01



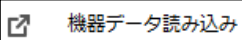
- ④最後にソシアック・ネオPC管理ソフトでインストールが出来たか確認を行います。ソシアック・ネオとPCをUSBケーブルで接続し、USB接続モード(本体電源OFFにし「◀ボタン」と「電源ボタン」を長押し)にし、 を選択します。

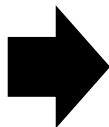

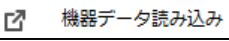
- ⑤  をクリックすると下記画面が表示されるので **USB-SERIAL CH340 (COM4)** を選択します。

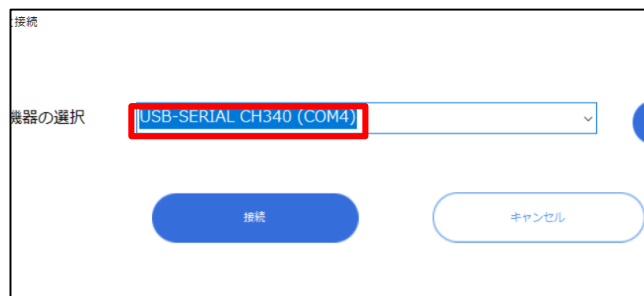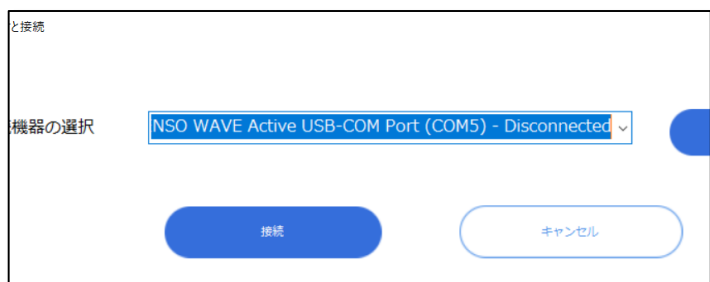

- ⑥  下記画面が表示されれば、正常に機器同士の通信が完了です。

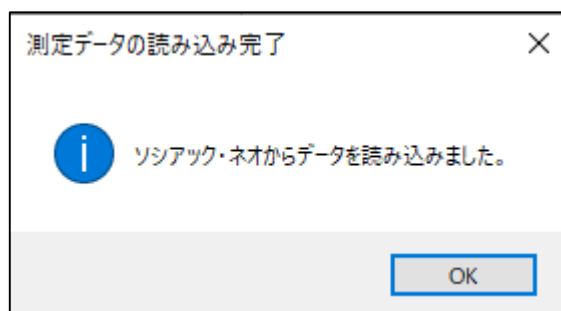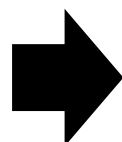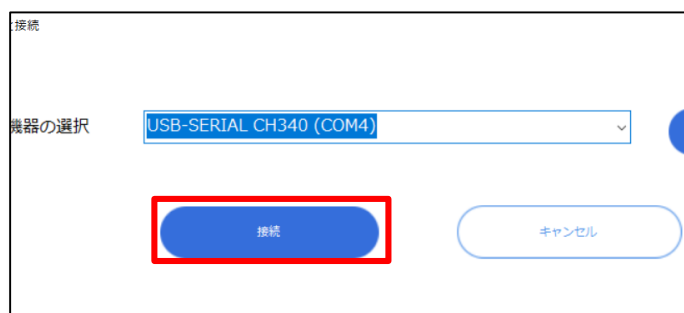

※以後、機器接続の際の接続機器の選択は **USB-SERIAL CH340 (COM4)** を選択し、 をクリックしてください。